

# Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition: 05.11.2025

Ref: EWTSOCLA8/4

**CLA 8/4 Simulateur d'intubation** 

Modèle de base sans larynx, exécution comme CLA 8, mais sans mallette de transport/rangement.

## Produits alternatifs

Ref: EWTSOCLA8

## CLA 8 Simulateur d'intubation, avec signal acoustique, haut du corps fixe sur support

avec modèle du larynx, mallette en aluminium de transport et de rangement











En grandeur nature, en matières plastiques.

En coopération avec le Centre fédéral pour l'éducation à la santé (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) de Cologne, nous avons développé un simulateur médical permettant l'apprentissage de la méthode d'intubation dans des conditions correspondant aux conditions naturelles.

Lors de la construction de ce simulateur, nous nous sommes tout particulièrement attachés à conférer au modèle des proportions absolument réalistes, afin dassurer son adaptation fonctionnelle.

En cas d'application erronée de la méthode d'intubation, c'est à dire en cas de pression trop élevée du laryngoscope sur les incisives supérieures, le simulateur émet un signal acoustique.

Une fois l'intubation effectuée, le positionnement correct du tube peut être contrôlé par auscultation des bruits respiratoires au moyen d'un stéthoscope appliqué sur le coté droit et gauche de la paroi thoracique.

Hauteur 25 cm, largeur 71 cm, profondeur 42 cm, poids 15,2 kg.

#### Composition du CLA 8:

- 1. Tête avec rachis dorsal, cavités nasales, buccales et pharynx, maxillaire avec dentition muni d'un capteur pour l'émission d'un signal, larynx, trachée avec poches poumon, montés de manière amovible.
- 2. Partie supérieure du corps avec paroi thoracique, membranes d'auscultation et générateur de signal acoustique montés sur une planche support.
- 3. Modèle de larynx sur pied pliable avec dispositif de sécurisation pour le transport.
- 4. Mallette de transport et de rangement (en aluminium).
- 5. Huile silicone, flacon pulvérisateur sous pression 250 ml
- 6. Tube d'intubation
- 7. Tourne-vis (petit et gros)
- 8. Mode d'emploi



# Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition: 05.11.2025

Ref: EWTSOCLA8/1

## **CLA 8/1 Simulateur d'intubation**

Modèle de base avec larynx, exécution comme CLA 8, mais sans mallette de transport/rangement.







En grandeur nature, en matières plastiques.

En coopération avec le Centre fédéral pour l'éducation à la santé (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) de Cologne, nous avons développé un simulateur médical permettant l'apprentissage de la méthode d'intubation dans des conditions correspondant aux conditions naturelles.

Lors de la construction de ce simulateur, nous nous sommes tout particulièrement attachés à conférer au modèle des proportions absolument réalistes, afin dassurer son adaptation fonctionnelle.

En cas d'application erronée de la méthode d'intubation, c'est à dire en cas de pression trop élevée du laryngoscope sur les incisives supérieures, le simulateur émet un signal acoustique.

Une fois l'intubation effectuée, le positionnement correct du tube peut être contrôlé par auscultation des bruits respiratoires au moyen d'un stéthoscope appliqué sur le coté droit et gauche de la paroi thoracique.

Hauteur 25 cm, largeur 71 cm, profondeur 42 cm, poids 15,2 kg.

## Composition du CLA 8:

- 1. Tête avec rachis dorsal, cavités nasales, buccales et pharynx, maxillaire avec dentition muni d'un capteur pour l'émission d'un signal, larynx, trachée avec poches poumon, montés de manière amovible.
- 2. Partie supérieure du corps avec paroi thoracique, membranes d'auscultation et générateur de signal acoustique montés sur une planche support.
- 3. Modèle de larynx sur pied pliable avec dispositif de sécurisation pour le transport.
- 5. Huile silicone, flacon pulvérisateur sous pression 250 ml
- 6. Tube d'intubation
- 7. Tourne-vis (petit et gros)
- 8. Mode d'emploi